

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 11月 9日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300152
作業年月日	平成 28年 11月 9日		作業時間	: Hr
顧客名	白鳥内科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府堺市西区鳳西町3丁目3-9		電話番号	: 072-265-5501
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 25年 11月 13日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 521
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0204/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 533 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒: 705 回	消毒+7L: 930 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 128 回	7Lアルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13011418 → NO. 10050207
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO. 120122-023 → NO. 140617-013
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
バリスタ		☒	1本	
マニホールド周辺チューブ		☒	1本	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
20 年 11月 9 日 ご署名 白鳥 伸也	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山