

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 090526

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿	機種	ONW-10
環営	防品	所在地	大阪府箕面市栗間谷6丁目14-1	機番	001347
		ユーザー名	ガラシア病院 様	納入日	平成19年3月29日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		受付日	平成21年4月25日		
計	3	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成21年5月22日

修理依頼・苦情内容

ブレーカーが落ちる（トリップする）
新鋭工業殿で確認したが再現はしなかった。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

・ブレーカートリップ再現確認

お預かりしている間、運転条件（間欠、連続など）を振って約40回運転確認した結果異常は2度再現しました。

水槽下側よりごく少量の水が漏れて電気機器（ピンチバルブ駆動抵抗）にかかり、ブレーカーが落ちたと思われます。この水漏れ箇所を溶接で補修しました。

・運転カウンタ 474回

[2] 修理・点検内容

1. 水槽下部側を塩ビ溶接による補修
2. 水系統のチェック及びアッパーカバー～水槽間をシリコンシーラントによる再充填
3. 最大電流値：6.14A・・・正常
4. 絶縁抵抗：∞・・・正常
5. オゾン水濃度測定：0.52～0.68mg/L・・・正常
6. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.9% 酸素流量：0.78 /min 圧力：0.130～0.231Mpa（AC100V、60Hz）
7. 運転動作確認・・・正常
8. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

推奨 交換 部品

承認				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
		メインスイッチ（漏電ブレーカ）	1	調査のため
作成				
H21.5.26				
中澤				