

管理 No.

発行日 平成 28年 9月 12日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	300377
作業年月日	平成 28年 9月 12日		作業時間	Hr
顧客名	阿部内科 御中		ご担当	院長先生 様
所在地	兵庫県三田市弥生が丘1丁目11フラワータウン駅ビル7階		電話番号	079-562-8478
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 26年 9月 22日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目		定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	✓	殺菌槽 LED 正常 ✓ エアライン 正常 ✓ オゾン水濃度計動作 正常 ✓ パルス数 1731 排水栓、排水ライン 正常 ✓ 細管送水ライン 正常 ✓ 排気ライン 正常 ✓ オゾン濃度 正常 ✓ 履歴 0.68 ppm 異常音、振動 正常 ✓ 電源コード 正常 ✓ 殺菌チューブ類 正常 ✓ マニホールド周辺ファブ 正常 ✓ プログラムVer 正常 ✓ 0205/T02C
酸素ライン	正常	✓	
アルコールライン	正常	✓	
オゾンセンサ	正常	✓	
給水ライン	正常	✓	
濃度計流量	正常	✓	
水位センサー	正常	✓	
水漏れ確認	正常	✓	
清掃	正常	✓	
トレイ	正常	✓	
殺菌槽コネクタ	正常	✓	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 150 回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 104 回	消毒+アル: 239 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 17 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 10060288 → NO. 10040152
排水フィルター	新型	☒	1個	オゾンセンサー NO. 130529-011 → NO. 150303-001
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、 <u>排水継手</u>
アルコールキャップ	新型	☒	1個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 阿部和夫

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山