

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 9月 15日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10			製造番号	: 525
作業年月日	平成 28年 9月 15日			作業時間	: Hr
顧客名	江本内科クリニック 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県豊岡市江本503			電話番号	: 079-629-0333
販売店				ご担当	様
納入年月日	平成 16年 11月 2日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	9回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

点検項目			点検項目		
電源釦	正常	☒	オゾン分解ファン	正常	☒
フィルタリセット釦	正常	☒	排水	正常	☒
運転/停止釦	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
アルコールモード釦	正常	☒	オゾンインジケータ	正常	☒
操作パネル	正常	☒	酸素発生	正常	☒
蛍光灯	正常	☒	水漏れ確認 装置外	正常	☒
フタロック	正常	☒	水漏れ確認 装置内	正常	☒
給水	正常	☒	洗浄コネクタ	正常	☒
細管洗浄 順方向	正常	☒	洗浄チューブ	正常	☒
細管洗浄 逆方向	正常	☒			
細管洗浄 エアパージ	正常	☒			
アルコールフラッシュ	正常	☒			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置情報	総運転回数: 2575 回	更新 (リセット) 実施・未実施	交換後運転回数: 302 回
酸素発生	濃度: 94.5 %	流量: 0.78 L/min	圧力: 111 ~ 193 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO, ☒ → NO, ☒
吸着筒		☐	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☐	一個	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28 年 9 月 15 日

舟木千明

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山