

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 9月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100221	
作業年月日	平成 28年 9月 13日		作業時間	:	Hr
顧客名	かないずみ胃腸科・内科 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	奈良県生駒郡三郷町東信貴ヶ丘1-8-26		電話番号	:	0745-32-3739
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 23年 4月 13日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・タッチパネルを触っても電源が入らない。 (主電源を切り暫くしてから電源を入れてもタッチパネルは消灯したまま電源が入らない。)			
不具合原因、作業内容			
・タッチパネルの不具合が原因と思われます。 ・パルス数が低下しておりました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 737
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107/T01.A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・タッチパネル、オゾン水濃度計を交換し正常作動したので終了。			
・マニホールド周辺チューブは経年劣化していたので交換しました。			

装置 情報	交換後運転回数:	323回	更新(リセット)実施	未実施	殺菌:	1563回	殺菌+アル:	0回
	リークチェック:	0回	自己洗浄:	4回	アルコール単独:	0回	エア単独:	1回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
タッチパネル		☒	1個	タッチパネル S/N: 087374H011240 → S/N: 087374H031080
オゾン水濃度計		☒	1個	オゾン水濃度計 NO. 11020577 → NO. 12061090
マニホールド周辺チューブ		☒	1式	マニホールド周辺チューブは製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	平成 28年 9月 14日 

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山