

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 9月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100185	
作業年月日	平成 28年 9月14日		作業時間	: Hr	
顧客名	奈良市立月ヶ瀬診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	奈良県奈良市月ヶ瀬尾山2790番地		電話番号	: 0743-92-0030	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 23年 2月 3日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 特になし、めくら全交換..

不具合原因、作業内容
 定期メンテナンス、今年3月にEG-580VW2購入、エアーリーク交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 646
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ Ver 0107 / T01.A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
 接続チューブのめくら全交換はマジックブルーの物を使用、締めもマジックブルーではなくマジックブルー。

装置情報	交換後運転回数: 68 回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 35 回	殺菌+7L: 226 回
	リークチェック: 330 回	自己洗浄: 155 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 1206/083 → NO. 1305/1403
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 1503/13-002 → NO. 1305/16-004
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 47 F 明子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業員
	柏田