

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 12月 6日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300010	
作業年月日	平成 28年 12月 6日		作業時間	:	Hr
顧客名	多可赤十字病院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県多可郡多可町中区岸上280		電話番号	:	0795-32-1223
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 3月 18日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シート記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☒	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・排水に黒い煤のような物が混じっている。排水用汚物処理シフに黒い煤が着いている。

不具合原因、作業内容

・排水スロー交換後1~2回は黒い煤が出るが問題はなく、その後は出なくなりました。
自己洗浄の排水も見ても黒い煤が出ていない事を確認してまいりました。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 470
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72. ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺フューズ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207/T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・排水用汚物処理シフに付着している黒い煤を除去し終了。

装置 情報	交換後運転回数: 377 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 531 回	消毒+アル: 1076 回
	リークチェック: 802 回	自己洗浄: 378 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, ☒ → NO, ☒
排水フィルター（新型）		☐	2個	オゾンセンサー NO, ☒ → NO, ☒
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山