

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 12月 7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	: 100577
作業年月日	平成 28年 12月 7日	作業時間	: Hr
顧客名	三木内科クリニック 御中	電話番号	: 院長先生 様
所在地	兵庫県高砂市荒井町中新町5-3	ご担当	: 079-443-8500
販売店		ご担当	様
納入年月日	平成 24年 12月 14日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4回目	定期点検ソール記入	☒
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守部品交換後、タッチパネルが表示されない。主電源を何回か入れなおしても、

不具合原因、作業内容

タッチパネルの故障が原因です。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 448
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺フューズ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0/07/ToLA

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

タッチパネル交換後 正常作動したので終了。※タッチパネルは無償です。

装置情報	交換後運転回数: 339 回	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 595 回	殺菌+アル: 506 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 491 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.100/0035 → NO.12020890
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.130516-028 → NO.140520-008
タッチパネル		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッチパネル W/N:087374H018257 → S/N:087374H031106

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28 年 12 月 7 日

ご署名

藤原

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山