

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 11月 2日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300158	
作業年月日	平成 28年 11月 2日		作業時間	: Hr	
顧客名	なべたに内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	兵庫県姫路市飾西492-1		電話番号	: 079-266-1515	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 26年 1月 14日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
9/27(火)より10/26(水)まで「E:111 排水注意」が計8回発生。	
不具合原因、作業内容	
排水フィルターの目詰まりが原因です。排水フィルターを撤去しました。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 357
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	プログラムVer 正常 ☒ 0204/To2BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
排水フィルターを撤去し、正常作動したことで終了。フィルター容器はそのまま設置。	

装置 情報	交換後運転回数: 135 回	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 5 回	消毒+アル: 2/6 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 3 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. ☒ → NO. ☒
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. ☒ → NO. ☒
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、排水継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
バックス		☒	1本	
		☐		

お客様ご確認署名欄		平成 28年 11月 2日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		ご署名 金谷 重吉

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山