

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-22506

No. 160914

配布先	納入先	新鋭工業（株） 大阪支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	内藤クリニック 様	機番	300305
環営	所在地	兵庫県尼崎市南塚口町 1-30-10	納入日	平成 26 年 5 月 16 日
環品	点検者	新鋭工業（株） 福田、IHIシパウラ 中澤	受付日	平成 28 年 8 月 12 日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 28 年 9 月 5 日

修理依頼・不具合内容

消毒時給水異常（E:202）

8/10・・・6 回発生 8/12・・・2 回発生：新鋭工業殿 現地確認

不具合原因（故障箇所）と処置


〔1〕点検結果

消毒時給水異常（E:202）は、給水工程で水が満水にならないと発生します。

水位センサー「LVH」を確認したところ、検知信号が不安定な状態でした。
このため水槽が満水状態でも「水が無い」と誤検知して「消毒時給水異常」が発生しました。

この部品とコントロール基板を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式

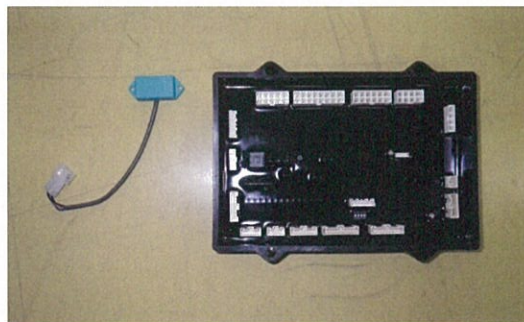

〔2〕作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常

〔3〕装置情報

交換後運転回数：470 消毒：773、消毒＋アルコール：0、リークチェック：1
自己洗浄：119、アルコール単独：1、エア単独：1

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位センサー（LVH）	1 個	
	コントロール基板	1 枚	

承認



審査



作成

H28. 9. 14
中澤

（株）IHIシパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528