

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 12月12日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300132
作業年月日	平成 28年 12月12日		作業時間	: Hr
顧客名	城井内科医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県宇陀市榛原下井足12-1		電話番号	: 0745-96-9680
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 25年 11月 26日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

ハズレの清掃

点検項目		結果	備考
フタロック	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	
トレイ	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	
殺菌槽 LED	正常	☒	
エアライン	正常	☒	
オゾン水濃度計動作	正常	☒	バルブ数 525
排水栓、排水ライン	正常	☒	
細管送水ライン	正常	☒	
排気ライン	正常	☒	
オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.72 ppm
異常音、振動	正常	☒	
電源コード	正常	☒	
殺菌チューブ類	正常	☒	
マニホールド周辺チューブ	正常	☒	
プログラムVer	正常	☒	Ver 1.04 / TO2BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

CF-Q260D EG530NW EG-590ZWR W-IX2
 @ LVCEA @ Advancia

装置 情報	交換後運転回数: 408 回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	消毒: 746 回	消毒+アル: 420 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 248 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 44 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 11020595 → NO. 1000/0054
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 091478-002 → NO. 140220-003
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

28 年 12 月 12 日

ご署名 城井 内科医院 院長

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田