

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-22581

No. 160926

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	林 医 院 様		機番	100327
環営	所在地	大阪府大阪市淀川区東三国 2-2-19		納入日	平成 23 年 11 月 17 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 28 年 8 月 26 日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 28 年 9 月 22 日
計	3				

修理依頼・不具合内容

・水漏れ（多量）
 運転回数・・殺菌；1948、殺菌＋アルコール；2284、リークチェック；0、自己洗浄；1051


不具合原因（故障箇所）と処置

この度は水漏れを発生させてしまい、大変申し訳ありませんでした。以下ご報告いたします

[1] 点検および作業内容

機械内部のオゾン水が通るホースに亀裂が発生し、そこから水漏れしていました（写真1）
 周辺のホース、チューブと濡れた部品を全て交換して復旧しました。
 経年劣化と思われますが、より耐久性のあるホースを検討、選定してまいります。

写真1：水漏れ箇所

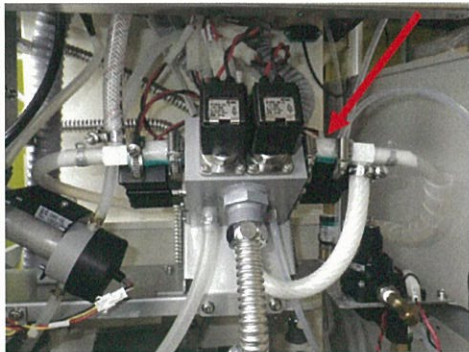

[2] 作業内容

1：部品交換・・写真と下表をご参照ください

[3] 性能確認

1：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.69 ppm・・正常
 2：運転確認・・・・正常

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	マニホールド周辺ホース	5 本	
	アルコールタンクキャップ	1 個	

承認

安

16.9.26

田

審査

中

16.9.26

澤

作成

H28. 9. 26

中澤