

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-21218

No. 160926

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10B
所在地	京都府京都市中京区壬生高樋町45-5		機番	001838
ユーザー名	にしかわ内科医院 様		納入日	平成22年8月4日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成28年1月19日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成28年9月20日

修理依頼・不具合内容

運転開始2～3分で「エラーH；排水異常」が発生する。

不具合原因（故障箇所）と処置

この度は修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。 以下ご報告いたします。

[1] エラーH（排水異常）につきまして

異常が再現することを確認しました。機械内部の排水系統に詰まりがあり
これが原因で排水量が下がって異常を出しました。

排水系統を分解清掃し、劣化した部品を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください
2. オゾン水濃度測定：0.42～0.52 mg/L・・・正常
3. 酸素ガス流量測定：0.74 L/min・・・正常
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常
6. 運転カウンタ・・・645

承認



審査



作成

H28. 9. 26
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	オゾン分解触媒	1 個	
2	配管チューブ、パッキン	1 式	
3	水位レベルセンサー	3 本	