

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 10月13日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300116	
作業年月日	平成 28年 10月 日		作業時間	: 1.5 Hr	
顧客名	おかもと内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県田辺市末広町9番8号		電話番号	: 0739-22-1929	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 25年 10月 8日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

バリズ交換実施 EG-590WR, W-II

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 391
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	プログラムVer 正常 ☒ Ver 0204/TO20

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 38 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒: 4 回	消毒+アル: 145 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 144 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO, 13081506 NO, 10120477
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO, 110112-019 NO, 120819-019
給水フィルター		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H28 年 10 月 13 日

ご署名 岡本 訓久

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者 作業者 柏田
---	--------------------