

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 12月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100051	
作業年月日	平成 28年 12月 13日		作業時間	: _____ Hr	
顧客名	かねみつ内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	京都府京都市右京区太秦下刑部町181番地		電話番号	: 075-873-8686	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 22年 5月 11日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・タッチパネルが表示されない。主電源を何回か入れなおしても。			
不具合原因、作業内容			
・タッチパネルの故障が原因です。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 447
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107/T01.A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・タッチパネルを交換し正常作動したので終了。			

装置 情報	交換後運転回数:	0回	更新（リセット）実施 ☒ 未実施	殺菌:	2184回	殺菌+アル:	3780回
	リークチェック:	0回	自己洗浄:	70回	アルコール単独:	7回	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, _____ → NO, _____
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, _____ → NO, _____
タッチパネル		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッチパネル S/N : 087374H007436 → S/N : 087374H031094
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	
ご署名 _____	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL : 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山