

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 28年 10月 18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100323	
作業年月日	平成 28年 10月 18日		作業時間	:	Hr
顧客名	そりおクリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県宝塚市栄町2-2-1 ソリオ宝塚3号棟1階		電話番号	:	0797-81-4655
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 23年 10月 6日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 747
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107/TOLA

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 105 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 9 回	殺菌+アル: 550 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 536 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 1308/487 → NO. 1402/697
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 130529-007 → NO. 121023-001
マニホールド周辺チューブ		☒	1本	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

宝塚市栄町2丁目2番1号(ソリオIF)
そりおクリニック
電話 (0797) 81-4655

修理業者	新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL : 06-6228-3311	責任技術者	作業者
			中山