

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 10月 21日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 659	
作業年月日	平成 28年 10月 21日		作業時間	: / Hr	
顧客名	横山内科 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県和歌市宇須1丁目5-15		電話番号	: 073-422-1741	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 16年 6月 22日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	9回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

点検項目		点検項目	
電源釦	正常 ☒	オゾン分解ファン	正常 ☒
フィルタリセット釦	正常 ☒	排水	正常 ☒
運転/停止釦	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
アルコールモード釦	正常 ☒	オゾンインジケータ	正常 ☒
操作パネル	正常 ☒	酸素発生	正常 ☒
蛍光灯	正常 ☒	水漏れ確認 装置外	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	水漏れ確認 装置内	正常 ☒
給水	正常 ☒	洗浄コネクタ	正常 ☒
細管洗浄 順方向	正常 ☒	洗浄チューブ	正常 ☒
細管洗浄 逆方向	正常 ☒		
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒		
アルコールフラッシュ	正常 ☒		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
Advancia 2011 (F) 吸引器材料			

装置情報	総運転回数: 1447 回	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	交換後運転回数: 174 回
酸素発生	濃度: 94.5 %	流量: 0.8 L/min	圧力: 105 ~ 183 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO. 11595 → NO. 12055
吸着筒		☒	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☒	一個	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 横山 申彦

修理業者	新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
			柏田