

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 28年 10月 28日

|       |                                        |                               |                                                                  |                                            |  |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                   |                               | 製造番号                                                             | : 300808                                   |  |
| 作業年月日 | 平成 28年 10月 28日                         |                               | 作業時間                                                             | : Hr                                       |  |
| 顧客名   | よしだ内科 御中                               |                               | ご担当                                                              | : 院長先生 様                                   |  |
| 所在地   | 大阪府茨木市新中条町12-24                        |                               | 電話番号                                                             | : 072-631-1117                             |  |
| 販売店   |                                        |                               | ご担当                                                              | 様                                          |  |
| 納入年月日 | 平成 28年 3月 24日                          | 保証期間                          | 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品                                        |  |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/>          | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 回目                                                               | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>         |  |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/> |  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴  
10/25(水)、10/27(木)、「E:111 排水注意」が1回ずつ発生。

不具合原因、作業内容  
排水フィルターが目詰りが原因です。

点検項目

|          |    |                                     |              |    |                                                 |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 484    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          |    |                                     | プログラムVer     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0207/T02C   |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |          |       |              |     |          |      |        |      |
|----------|----------|-------|--------------|-----|----------|------|--------|------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: | 111 回 | 更新 (リセット) 実施 | 未実施 | 消毒:      | 13 回 | 消毒+アル: | 99 回 |
|          | リークチェック: | 87 回  | 自己洗浄:        | 1 回 | アルコール単独: | 0 回  | エア単独:  | 0 回  |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                                                                  |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定期交換部品セット | 新型    | <input type="checkbox"/>            | 1セット | オゾン水濃度計 NO. <input checked="" type="checkbox"/> → NO. <input checked="" type="checkbox"/> |
| 排水フィルター   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサー NO. <input checked="" type="checkbox"/> → NO. <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし                                     |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                                                                           |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |