

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号 03-20324 No. 161031

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿	機種	ONW-10
所在地	兵庫県朝来市和田山町47	機番	000777
ユザ名	上垣医院 様	納入日	平成17年4月20日
点検者	中澤一裕	作業時間	
		受付日	平成27年8月28日
返送先	納入先と同じ	出荷日	平成28年10月29日

修理依頼・不具合内容

各部点検

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

各部を分解点検、清掃し、性能が劣化した部品を交換しました。

No.1～3：定期交換部品

No.4～10：センサー、ポンプ、チューブ、スプリング



[2] 修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください
- オゾン水濃度測定：0.43～0.52 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.7 % 酸素流量：0.79 L/min 圧力：0.097～0.176 MPa（AC100V 60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
- 運転カウンタ・・・2330

承認

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1～3	定期交換部品		
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、オゾン触媒	1式	
4	水位レベルセンサー	3本	
5	オゾンセンサー	1個	
6～8	水ポンプ（P-1、P-2、P-3）	3台	
9	配管チューブ、パッキン	1式	
10	フタスプリング	4個	

審査

作成

H28.10.31

中澤