

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 11月 4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100110
作業年月日	平成 28年 11月 4日		作業時間	: Hr
顧客名	明海病院 御中		電話番号	: 院長先生 様
所在地	兵庫県明石市藤江201		ご担当	: 078-922-8800
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 22年 9月 15日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒	修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

正面、両側面パネルが所々錆びている。

不具合原因、作業内容

長期に渡り水が掛かっていた事が原因と見られます。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ ハルス数 429
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107/TOLA

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

正面、両側面パネルを交換し終了。

装置 情報	交換後運転回数： 72 回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌： 385 回	殺菌＋アル： 1816 回
	リークチェック： 4 回	自己洗浄： 1266 回	アルコール単独： 77 回	エア単独： 2 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, ☒ → NO, ☒
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, ☒ → NO, ☒
正面、両側面パネル・新古品		☒	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 出井

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山