

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-21910

No. 161220

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10
所在地	兵庫県西宮市南昭和町 8-16		機番	001515
ユーザー名	かとう内科・外科・整形外科クリニック 様		納入日	平成 20 年 1 月 18 日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 28 年 5 月 27 日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 28 年 12 月 19 日

修理依頼・不具合内容

各部点検

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

機械の内部点検、分解清掃し、劣化した部品を交換いたしました。

No.1～3：定期交換部品

No.4～6：水ポンプ、レベルセンサ、配管チューブ



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください

2. オゾン水濃度測定：0.45～0.63 mg/L・・・正常

3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：92.6 % 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.095～0.178 MPa（AC100V 60Hz）

4. 運転動作確認・・・正常

5. オゾンインジケータ変色・・・正常

6. 運転カウンタ・・・1500

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1～3	定期交換部品	1 式	
	吸着筒、吸湿筒、オゾン触媒		SPS-12093
4	水ポンプ（P-1）	1 台	
5	水位レベルセンサー	3 本	
6	配管チューブ、パッキン	1 式	

承認



審査



作成

H28. 12. 20
中澤