

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 11月 0日

|       |                                                                                        |                                                                       |      |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                                    |                                                                       | 製造番号 | : 100503       |
| 作業年月日 | 平成 28年 11月 日                                                                           |                                                                       | 作業時間 | : Hr           |
| 顧客名   | 藤民病院 御中                                                                                |                                                                       | ご担当  | : 院長先生 様       |
| 所在地   | 和歌山県和歌山市塩屋3丁目6番2号                                                                      |                                                                       | 電話番号 | : 073-445-9881 |
| 販売店   |                                                                                        |                                                                       | ご担当  | 様              |
| 納入年月日 | 平成 24年 6月 21日                                                                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品  |                |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 3回目                        | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                    |      |                |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |      |                |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                        |              |                                                       |
|----------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 428       |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm    |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
|          |                                        | プログラムVer     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver 0107/TEL.A |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

MONA CLAVE (MC-R220) DC-A00(1205055), Advancia EG-580NW  
11/12/27 3時

|          |               |                                                                                |              |             |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 28 回 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌: 30 回     | 殺菌+アル: 37 回 |
|          | リークチェック: 2 回  | 自己洗浄: 5 回                                                                      | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 1 回   |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | ＜ 交換部品製造番号 ＞                          |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 120120112 → NO. 12071108  |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサ NO. 09125-009 → NO. 140729-007 |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、          |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      | 給水フィルターの5点は製造番号なし                     |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                       |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H 28 年 11 月 10 日

ご署名 田尻 てい子

|                                                               |       |     |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店<br>大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1<br>TEL: 06-6228-3311 | 責任技術者 | 作業者 |
|                                                               |       | 柏田  |