

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 1月 12日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300766	
作業年月日	2017年 1月 12日		作業時間	: Hr	
顧客名	たにぐちクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	大阪府大阪市旭区森小路2丁目3-27サンハイツ1階		電話番号	: 06-6951-1717	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2016年 1月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・看護師様と相談の上、排水フィルタのみ撤去。検査数: 約1回/日。

不具合原因、作業内容

・消毒時間を通常モード(14分)に変更。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 670
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 073 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207/To3C

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・検査数が多くなり時短モードの依頼の際、排水フィルタのみ設置し時短モードに。

装置情報	交換後運転回数: 86 回	更新(リセット)実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 11 回	消毒+アル: 75 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 8 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.14081885 → NO.14051794
排水フィルター のみ 撤去		☐	1個	オゾンセンサー NO.141014-007 → NO.130110-009
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
アルコールカートリッジ 新規		☒	1個	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

平井 美子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山