

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 1月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機　OED－１０００			製造番号	: 300563
作業年月日	2017年　１月　１３日			作業時間	: Hr
顧客名	道仁病院　御中			ご担当	: 院長先生　様
所在地	大阪府寝屋川市仁和寺町31-1			電話番号	: 072-827-1951
販売店				ご担当	様
納入年月日	2015年　６月　１７日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修　理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・1/6（金）から1/13（金）まで『E：111 排水注意』が計6回発生。			
不具合原因、作業内容			
・排水フィルターの目詰りが原因です。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 506
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺ケーブル	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0205/T02C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・排水フィルターを新型に交換し、正常作動したので終了。			

装置 情報	交換後運転回数：	345回	更新（リセット）実施	・未実施	殺菌：	742回	殺菌＋アル：	477回
	リークチェック：	2回	自己洗浄：	1回	アルコール単独：	0回	エア単独：	0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
排水フィルター（新型）		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日 ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL：06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山