

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 28年 11月 15日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300689	
作業年月日	平成 28年 11月 15日		作業時間	:	Hr
顧客名	松本外科・胃腸内科医院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府豊中市北桜塚三丁目1-48		電話番号	:	06-6855-7676
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 27年 11月 11日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 481
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺f1-7	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207/T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 307回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	消毒: 63回	消毒+7L: 24.5回
	リークチェック: 0回	自己洗浄: 20回	アルコール単独: 0回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14051764 → NO. 12051020
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO. 140701-003 → NO. 140825-007
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成 28年 11月 15日

ご署名 安国 由貴子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者 中山
---	-------------