

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2017年/月/日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300041	
作業年月日	2017年/月/日		作業時間	: / Hr	
顧客名	野木病院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	兵庫県明石市魚住町長坂寺1003-1		電話番号	: 078-947-7272	
販売店	株三栄堂 新神戸支店		ご担当	山口 様	
納入年月日	2013年 7月 30日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

(E:111)排水注意発生 1/25 ③回、1/27 ②回、1/28 ②回、1/30 ①回 (1/25より発生)

不具合原因、作業内容

排水フィルター内に異物が堆積し目詰まりを引き起こし、排水注意が発生した模様。

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
		プログラムVer	正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水フィルター交換後の試運転で正常終了。
連絡事項：蛋白系の除去剤をお持ちいただければオウゴンシを推奨します。

装置情報	交換後運転回数: 302回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 299回	消毒+アル: 2170回
	リークチェック: 0回	自己洗浄: 691回	アルコール単独: 2回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター(新型)		☒	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

129 年 1 月 30 日

ご署名

中西 純世

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

山田