

管理 No.

発行日 平成 28年 12月 1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号	: 100566
作業年月日	平成 28年 12月 1日			作業時間	: Hr
顧客名	竹村クリニック 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市都島区都島本通3-7-8			電話番号	: 06-6921-3541
販売店				ご担当	様
納入年月日	平成 24年 11月 22日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック 正常 ☒ 酸素ライン 正常 ☒ アルコールライン 正常 ☒ オゾンセンサ 正常 ☒ 給水ライン 正常 ☒ 濃度計流量 正常 ☒ 水位センサー 正常 ☒ 水漏れ確認 正常 ☒ 清掃 正常 ☒ トレイ 正常 ☒ 殺菌槽コネクタ 正常 ☒ 殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 366 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ マニホールド周辺フル 正常 ☒ プログラムVer 正常 ☒ 0107 / T01.A			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
排気ファンの音が やや大きい。			

装置 情報	交換後運転回数：1222回	更新(リセット)実施・未実施	殺菌：388.5回	殺菌+7L：206.5回
	リークチェック：0回	自己洗浄：199回	アルコール単独：18回	エア単独：0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14011866 → NO. 11080744
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 140609-010 → NO. 140729-006
バリスタ		☒	1本	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、 不 継手、
マニホールド周辺パイプ		☒	1本	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28 年 12 月 / 日

ご署名 57 17 97 2 7

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山