

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 12月 6日

|       |                                                                                                   |                                                                       |      |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                                                                              |                                                                       | 製造番号 | : 300184       |
| 作業年月日 | 平成 28年 12月 6日                                                                                     |                                                                       | 作業時間 | : Hr           |
| 顧客名   | 宮崎クリニック 御中                                                                                        |                                                                       | ご担当  | : 院長先生 様       |
| 所在地   | 兵庫県丹波市柏原町南多田686-1                                                                                 |                                                                       | 電話番号 | : 0795-73-5501 |
| 販売店   |                                                                                                   |                                                                       | ご担当  | 様              |
| 納入年月日 | 平成 26年 2月 12日                                                                                     | 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品  |                |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 回目                                    | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                    |      |                |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/>                            |      |                |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

12/6(火)「E:209 原水汚染異常」が発生。

不具合原因、作業内容

濃度計フィルターの汚れが原因と思われます。濃度計フィルターを交換。

点検項目

|          |    |                                     |              |    |                                                 |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 450    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          |    |                                     | プログラムVer     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0207/T02BV  |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

濃度計フィルターを交換し正常作動したので終了。

|      |                |                                                     |              |               |
|------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 704 回 | 更新(リセット)実施: <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 | 消毒: 803 回    | 消毒+アル: 1474 回 |
|      | リークチェック: 4 回   | 自己洗浄: 763 回                                         | アルコール単独: 3 回 | エア単独: 0 回     |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                                                                  |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input type="checkbox"/>            | 1セット | オゾン水濃度計 NO, <input checked="" type="checkbox"/> → NO, <input checked="" type="checkbox"/> |
| 排水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO, <input checked="" type="checkbox"/> → NO, <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし                                     |
| 濃度計フィルター  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1枚   |                                                                                           |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 中山  |