

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 12月 9日

|       |                                        |                               |                                                                  |           |                                     |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                   |                               | 製造番号                                                             | : 300662  |                                     |
| 作業年月日 | 平成 28年 12月 9日                          |                               | 作業時間                                                             | :         | Hr                                  |
| 顧客名   | とくいクリニック 御中                            |                               | ご担当                                                              | :         | 院長先生 様                              |
| 所在地   | 大阪府茨木市大池2丁目13-22                       |                               | 電話番号                                                             | :         | 072-636-1091                        |
| 販売店   |                                        |                               | ご担当                                                              | :         | 様                                   |
| 納入年月日 | 平成 27年 10月 20日                         | 保証期間                          | 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品       |                                     |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/>          | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 回目                                                               | 定期点検シール記入 | <input type="checkbox"/>            |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付    | <input checked="" type="checkbox"/> |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・12/8(木)「排水注意」が計4回発生。

不具合原因、作業内容

・排水フィルターの目詰まりが原因です。排水フィルター新型に交換。

点検項目

|          |    |                                     |              |    |                                                 |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 6/5    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          |    |                                     | プログラムVer     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0207/T02C   |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・排水フィルター新型に交換し正常作動したので終了。

|          |                |                |              |              |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 112 回 | 更新(リセット)実施・未実施 | 消毒: 98 回     | 消毒+アル: 445 回 |
|          | リークチェック: 450 回 | 自己洗浄: 270 回    | アルコール単独: 2 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                                                                  |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input type="checkbox"/>            | 1セット | オゾン水濃度計 NO, <input checked="" type="checkbox"/> → NO, <input checked="" type="checkbox"/> |
| 排水フィルター   | 新型    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサー NO, <input checked="" type="checkbox"/> → NO, <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし                                     |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                                                                           |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山