

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 12月20日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300707	
作業年月日	平成 28年 12月 20日		作業時間	:	1 Hr
顧客名	楽クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市築港3-21-2		電話番号	:	073-433-5000
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 27年 12月 14日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 702
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ Ver.2.0 / TOIC

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
② ASONE、オゾン水濃度計：2ヤマ、FTS、EG-450WR5 22.7W-1500 保管庫あり。 EC-590WM3

装置 情報	交換後運転回数： 904 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒： 645 回	消毒+アル： 260 回
	リークチェック： 0 回	自己洗浄： 246 回	アルコール単独： 10 回	エア単独： 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14057800 → NO. 16082466
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 140804-010 → NO. 13114-019
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	28 年 12 月 20 日
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 松本和子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田