

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2017年 3月 7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100236
作業年月日	2017年 3月 7日		作業時間	: Hr
顧客名	やすだ医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市此花区西九条3丁目8-11		電話番号	: 06-6463-5446
販売店			ご担当	様
納入年月日	2011年 9月 22日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・タッチパネルが表示されない。主電源を何回か入れなおしても。			
不具合原因、作業内容			
・タッチパネルの故障が原因です。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 388
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107/T01.A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・タッチパネルを交換し正常作動したので終了。			

装置 情報	交換後運転回数: 0 回	更新（リセット）実施: ☒ 未実施	殺菌: 24 回	殺菌+アル: 268 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
タッチパネル		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッチパネル S/N: 087374H01522 → S/N: 087374H030767

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	
ご署名 岡本	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山