

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 1月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100328
作業年月日	2017年 1月 13日		作業時間	: Hr
顧客名	長崎医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府藤井寺市岡町2丁目1-4		電話番号	: 0729-55-7070
販売店			ご担当	様
納入年月日	2012年 1月 11日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 607
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107/To/A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 496回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 743回	殺菌+アル: 1678回
	リークチェック: 4回	自己洗浄: 1265回	アルコール単独: 6回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.13071458 → NO.11030602
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.120508-015 → NO.141006-007
バリスタ		☒	1本	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1式	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年	月 日
ご署名 林田	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山