

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-22788

No. 170113

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 大阪支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	岡村医院 様		機番	100053
環営	所在地	京都府京都市左京区鹿ヶ谷上宮ノ前町 45		納入日	平成 22 年 6 月 22 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 28 年 10 月 28 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 29 年 1 月 11 日

修理依頼・不具合内容

- ・タッチパネルに手を触れていない状態で電源が入ったり切れたりする

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検および作業内容

環境条件や導通状態を変化させて確認しましたが不具合は再現しませんでした。
しかし過去の事例から故障の前兆と判断してタッチパネル交換しました。

この修理と合わせて劣化したホースの交換、H29年保守点検を実施しました。

写真1：タッチパネル、チューブ

写真2：定期交換部品



〔2〕作業内容

- 1：タッチパネル～コントロール基板の配線チェック・・・正常
- 2：部品交換・・・写真と下表をご参照ください

〔3〕性能確認

- 1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.71ppm・・・正常（濃度パルス信号：505）
- 2：運転確認・・・正常

承認



審査



作成

H29. 1. 13

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	タッチパネル	1 台	
	マニホールド周辺チューブ	1 式	
	定期交換部品	1 式	濃度計：11030607
			オゾン計：140805-005

（株）IHIシパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528