

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

03-22615

No. 170127

|     |       |                  |      |     |            |
|-----|-------|------------------|------|-----|------------|
| 配布先 | 納入先   | 新鋭工業株式会社 大阪支店 殿  |      | 機種  | ONW-10     |
| 客先  | 所在地   | 大阪府箕面市栗間谷6丁目14-1 |      | 機番  | 001347     |
| 環営  | ユーザー名 | ガラシア病院 様         |      | 納入日 | 平成19年3月29日 |
|     | 点検者   | 中澤一裕             | 作業時間 | 受付日 | 平成28年9月1日  |
| 計   | 返送先   | 納入先と同じ           |      | 出荷日 | 平成29年1月25日 |

## 修理依頼・苦情内容

・エラー6（PSA；酸素発生装置異常） ・インジケータ変色不良 ・アルコールが減らない

## 不具合原因（故障箇所）と処置予定

### [1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ①エラー6、インジケータ変色不良、につきまして  
酸素発生装置の性能が低下しており、これが原因でエラー6やインジケータの変色が「要点検」の状態になっておりました。
- ②アルコールが減らない不具合につきまして  
アルコールタンクキャップの破損が原因でした。

上記の部品と劣化した部品を交換して復旧いたしました。

No1～3：定期交換部品



No4～8：水位センサ、ポンプ、チューブ



### [2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.52～0.64 mg/L ・ ・ 正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検 ・ ・ 正常  
酸素濃度：93.0% 酸素流量：0.76 /min 圧力：0.097～0.183MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認 ・ ・ 正常
5. オゾンインジケータ変色 ・ ・ 正常 運転カウンタ：1623

承認



審査



作成

H29. 1. 27

中澤

## 交換部品

| 部品番号 | 部品名称                    | 数量 | 備考 |
|------|-------------------------|----|----|
| 1～3  | 定期交換部品                  | 1式 |    |
|      | 吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、オゾン分解触媒 |    |    |
| 4    | 配管チューブ、パッキン             | 1式 |    |
| 5    | 水位レベルセンサー               | 3本 |    |
| 6～8  | 水ポンプ（P-1、P-2、P-3）       | 3台 |    |