

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 2月10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100572
作業年月日	2017年 2月10日		作業時間	: / Hr
顧客名	奈良市立都祁診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県奈良市都祁白石町1084		電話番号	: 0743-82-1411
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 2月 8日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 516
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ Ver 0107 / T01.A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
LUCERA (オゾン) GIF-XP260NS, GIF-XQ200, 保管庫有り. TAF-5000FD(0809020)

装置 情報	交換後運転回数: 359 回	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 1428 回	殺菌+アル: 0 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 387 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10090426 → NO.11020590
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.130528-015 → NO.130508-009
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	H29年 2月 10日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 岸本 恵子	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
シ	柏田