

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 4月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号	: 100446
作業年月日	2017年 4月 13日			作業時間	: Hr
顧客名	西江井島病院 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県明石市大久保町西島653			電話番号	: 078-947-5311
販売店				ご担当	様
納入年月日	2012年 4月 25日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 483
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107-TOHA
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 346 回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 655 回	殺菌+アル: 1347 回
	リークチェック: 1480 回	自己洗浄: 825 回	アルコール単独: 74 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10010105 → NO.10060278
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.110818-018 → NO.11023-003
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄		
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
年 月 日		ご署名 智 口

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山