

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 2月 24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 O E D - 1 0 0 0			製造番号	: 100328
作業年月日	2017年 2月 24日			作業時間	: Hr
顧客名	長崎医院 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府藤井寺市岡町2丁目1-4			電話番号	: 0729-55-7070
販売店				ご担当	様
納入年月日	2012年 1月 11日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修 理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルが表示されない。主電源を何回か入れなおしても。

不具合原因、作業内容

・タッチパネルの故障が原因です。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 525
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺フューズ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107/T01.A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・タッチパネルを交換し正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数：	496回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌：	743回	殺菌＋アル：	1678回
	リークチェック：	4回	自己洗浄：	1265回	アルコール単独：	6回	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
タッチパネル		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッチパネル S/N: 087374H012853 → S/N: 087374H030802
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 内田

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山