

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2017年 4月 21日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                     |                               | 製造番号                                                             | : 300559                                      |
| 作業年月日 | 2017年 4月 21日                             |                               | 作業時間                                                             | : 1.5 Hr                                      |
| 顧客名   | くしもと町立病院 御中                              |                               | ご担当                                                              | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台691番地7                    |                               | 電話番号                                                             | : 0735-62-7111                                |
| 販売店   |                                          |                               | ご担当                                                              | 様                                             |
| 納入年月日 | 2015年 4月 24日                             | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 2回目                                                              | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                     |              |    |                                                    |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 338       |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm    |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                |
|          |    |                                     | プログラムVer     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> Ver0205 / T02C |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

マニホールド周辺チューブ交換済 CV-290 ①CF-HQ290I ②Q260M  
保管庫あり。 ③GIF-H290 ④GIF-Q260 ⑤CF-Q260AI ⑥JF-260V ⑦GIF-XP260N

|          |                |                |               |              |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 858 回 | 更新（リセット）実施・未実施 | 消毒: 725 回     | 消毒+アル: 980 回 |
|          | リークチェック: 968 回 | 自己洗浄: 284 回    | アルコール単独: 12 回 | エア単独: 9 回    |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                             |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 10080250 → NO. 13091537                  |
| 排水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO. 140708-006 → NO. 141104-005              |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、ネット継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                                      |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2017年 4月 21日

ご署名 橋 秀明

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 柏田  |