

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2017年 4月 20日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300101
作業年月日	2017年 4月 20日		作業時間	: Hr
顧客名	半田クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府八尾市若林町1-87 7ML医療センター 1階		電話番号	: 072-949-1597
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 9月 26日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルが起動しない。主電源を何回か入れなおしても。

不具合原因、作業内容

・タッチパネルの不具合が原因です。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 334
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0204 / T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・タッチパネルを交換し、正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数： 0 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒： 621 回	消毒+アル： 274 回
	リークチェック： 0 回	自己洗浄： 13 回	アルコール単独： 0 回	エア単独： 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
タッチパネル		☒	1個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		タッチパネル S/N: 087374H026785 → S/N: 087374H030837

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 今村 夏代

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山