

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2017年 5月 10日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300562
作業年月日	2017年 5月 10日		作業時間	: Hr
顧客名	松本胃腸科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市中央区北長狭通5-1-21福建会館ビル2階		電話番号	: 078-367-3760
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 5月 13日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 541
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0205 / T02C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 153 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 213 回	消毒+アル: 122 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 130 回	アルコール単独: 6 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 11120825 → NO. 10060270
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 131109-038 → NO. 140418-006
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年	月 日
ご署名 松本 修志	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山