

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-23111

No. 170428

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿	機種	ONW-10
所在地	兵庫県揖保郡太子町立岡123	機番	000928
ユーザー名	二ノ丸内科 様	納入日	平成18年1月16日
点検者	中澤一裕	作業時間	
		受付日	平成28年12月26日
返送先	納入先と同じ	出荷日	平成29年4月24日

修理依頼・不具合内容

主電源が落ち、院内のブレーカもトリップした。
その後、エラー4（洗浄中水位低下）が発生した。

不具合原因（故障箇所）と処置

ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした。以下の通りご報告いたします。

エラー4は再現しました。分解点検したところ、排水バルブとコントロール基板の回路に過電流の跡が見られ、正常動作しませんでした。

排水バルブが故障した際に発生した過電流を検知して、ブレーカがトリップしたと判断します。これらの部品を全て交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- オゾン水濃度測定：0.44～0.61mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.6％ 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.107～0.196 MPa（AC100V 60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
- 運転カウンタ：1322

一以上一

承認
安 17.4.28 田
審査
中 17.4.28 澤
作成
H29.4.28 中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	排水バルブ	1	
	排水バルブ駆動用抵抗	1	
	コントロール基板	1	
	水槽キャップ パッキン	1	