

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 5月 19日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300308
作業年月日	2017年 5月 19日		作業時間	: Hr
顧客名	奥医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府東大阪市柏田本町3-8		電話番号	: 06-6721-1324
販売店			ご担当	様
納入年月日	2014年 5月 30日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハル数 625 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ プログラムVer 正常 ☒ 0204 / T02BV
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサー	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	
トレイ	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 203 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 283 回	消毒+アル: 264 回
	リークチェック: 2 回	自己洗浄: 50 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13101554 → NO. 11070710
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO. 131126-619 → NO. 131102-009
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年	月 日
ご署名 小田 千鶴	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山