

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 5月 16日

|       |                                                                                        |                                                                       |      |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                                                                   |                                                                       | 製造番号 | : 300852       |
| 作業年月日 | 2017年 5月 16日                                                                           |                                                                       | 作業時間 | : Hr           |
| 顧客名   | 辻診療所 御中                                                                                |                                                                       | ご担当  | : 院長先生 様       |
| 所在地   | 大阪府大阪市西淀川区姫里2-1-22                                                                     |                                                                       | 電話番号 | : 06-6472-5550 |
| 販売店   |                                                                                        |                                                                       | ご担当  | 様              |
| 納入年月日 | 2016年 6月 15日                                                                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品  |                |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1回目             | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |      |                |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |      |                |

|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
|---------------------------|----|-------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
| 不具合原因、作業内容                |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
| 点検項目                      |    |                                     |              |    |                                                 |
| フタロック                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 603    |
| オゾンセンサ                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           |    |                                     | プログラムVer     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0207/T02C   |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |

|          |               |                |              |             |
|----------|---------------|----------------|--------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 57 回 | 更新（リセット）実施・未実施 | 消毒: 3 回      | 消毒+アル: 55 回 |
|          | リークチェック: 0 回  | 自己洗浄: 4 回      | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回   |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | ＜ 交換部品製造番号 ＞                                          |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 14111967 → NO. 14081884                   |
| 排水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO. 141112-010 → NO. 130516-006               |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                                       |

|                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| お客様ご確認署名欄                                                            |                                 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |                                 |
|                                                                      | 1729年 5月 16日<br>ご署名 <u>辻 院長</u> |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
 TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |