

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 5月 29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100222
作業年月日	2017年 5月 29日		作業時間	: Hr
顧客名	大間知クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府東大阪市長堂2丁目15-10		電話番号	: 06-6618-1000
販売店			ご担当	様
納入年月日	2011年 5月 12日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	6回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 686
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107 / To/A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 248 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 653 回	殺菌+7L: 1499 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 1067 回	7Lアルコール単独: 485 回	エア単独: 4 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 11060665 → NO. 12040958
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 110112-013 → NO. 130724-001
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
年	月 日
ご署名	大間知 祥孝

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山