

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 4月 18日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300531
作業年月日	2017年 4月18日		作業時間	: / - 0 Hr
顧客名	とみお岩崎クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県奈良市二名3-1046-1		電話番号	: 0742-93-8755
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 4月 3日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 449
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ Ver0205 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

KD-30 スイッチ交換, AU-50CB, エヤ YS-A-C108, W-E G1F-xP290N
CLV-290

装置 情報	交換後運転回数: 53 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 107 回	消毒+アル: 0 回
	リークチェック: 97 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.13111607 → NO.14071850
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.131114-001 → NO.131029-008
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
保管庫KD-30用				排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
定期交換部品セット		☒	1セット	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29年 4月 18日



ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田