

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2017年 7月6日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300331
作業年月日	2017年 7月6日		作業時間	: / Hr
顧客名	さくらクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県海南市名高140-1		電話番号	: 073-484-5001
販売店			ご担当	様
納入年月日	2014年 7月 18日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	3回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 542
オゾンセンサー	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ Ver0204 / 702B6

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

EG-530NW・EG-3000FP・EC-3000MP・Justia・MMC-1500WDX

装置情報	交換後運転回数: 484 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒: 1247 回	消毒+アル: 157 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 16062351 → NO. 1411958
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO. 141118-003 → NO. 141121-009
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

29 年 7 月 6 日

ご署名

田南 要

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田