

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 7月 11日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300915
作業年月日	2017年 7月 11日		作業時間	: Hr
顧客名	新阿武山病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府高槻市奈佐原4丁目10番1号		電話番号	: 072-693-1881
販売店	7 13		ご担当	様
納入年月日	2016年 7月 23日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED
酸素ライン	正常	☒	エアライン
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン
濃度計流量	正常	☒	排気ライン
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動
清掃	正常	☒	電源コード
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ
			プログラムVer
			0207 / T&C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数:	162 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒:	77 回	消毒+アル:	97 回
	リークチェック:	62 回	自己洗浄:	42 回	アルコール単独:	0 回	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 15052030 → NO. 14121972
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 150126-003 → NO. 130516-002
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	ご署名
東海林 幸枝	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山