

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2017年 7月18日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300332	
作業年月日	2017年 7月18日		作業時間	: / Hr	
顧客名	和歌山生協病院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県和歌山市有本143-1		電話番号	: 073-471-7711	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2014年 7月 25日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 521
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ Ver.0204/T020V
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
PCT-R240AL, PCF-R260A1, CF-H260AZ1, PCT-R260AZ1, 保管庫あり.			

装置 情報	交換後運転回数: 430 回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 599 回	消毒+アル: 713 回
	リークチェック: 646 回	自己洗浄: 451 回	アルコール単独: 25 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 16062349 → NO. 11080735
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO. 131210-009 → NO. 131109-041
給水フィルター	(中空糸)	☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄		2017年 7月 18日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		野田 優子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田