

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 10月 2日
8

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300660
作業年月日	2017年 10月 2日		作業時間	: 1.5 Hr
顧客名	和歌山生協病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市有本143-1		電話番号	: 073-471-7711
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 10月 16日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
6/27~排水注意 昨年 1/4 排水注意

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 620
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ Ver 0207 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1726 回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	消毒: 2148 回	消毒+アル: 1211 回
	リークチェック: 803 回	自己洗浄: 616 回	アルコール単独: 17 回	エア単独: 5 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO, 11120815 → NO, 16062372
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO, 120515-025 → NO, 14118-003
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
排水ホース		☒		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田