

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 6月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機　OED－１０００			製造番号	: 100759
作業年月日	2017年　6月21日			作業時間	: 1.5 Hr
顧客名	まつもとクリニック　御中			ご担当	: 院長先生　様
所在地	和歌山県和歌山市松島347-5			電話番号	: 073-476-0801
販売店				ご担当	様
納入年月日	2013年　6月　26日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修　理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 694
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ Ver 0107 TOL-A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

Adymia, EG-530NW, W-エ, 保管庫なし. 6/ E-215

装置 情報	交換後運転回数: 244 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 169 回	殺菌+アル: 75 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 18 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12040966 → NO. 12061087
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 111213-020 → NO. 141201-012
マニホールド周辺 チューブ		☒	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2017年 6月 21日

和歌山県和歌山市松島347-5

まつもとクリニック

073-476-0801

ご署名 松本 司

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田